



Stap 1

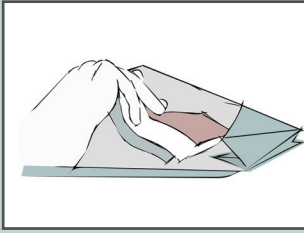


Stop thuis het schone materiaal in het kleinste vakje van de Stoma-Kit.

Stap 2

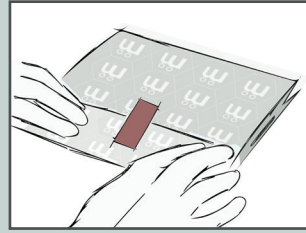


Sluit de Stoma-Kit af met de losse sticker.

Stap 3

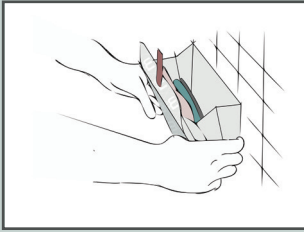

Wil je je stomamateriaal vervangen? Open de Stoma-Kit, verwijder de roze plakstrip, en plak de Stoma-Kit tegen de wand aan.

Stap 4

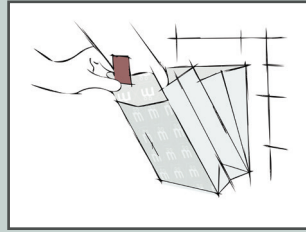


Trek de Stoma-Kit voorzichtig naar je toe, hierdoor ontstaan 2 vakken. Haal de schone spullen uit het achterste vak en stop de gebruikte spullen in het voorste vak.

Stap 5



Verwijder de Stoma-Kit voorzichtig van de muur en sluit hem af met de plakstrip op de klep.

Stap 6

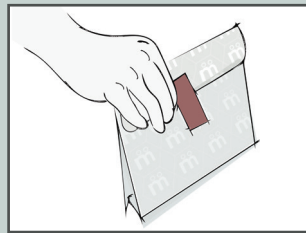

Gooi de Stoma-Kit weg.

Bedankt voor je aankoop! Wij wensen je veel gebruiksgemak.